

DATENBLATT

Sterilance Press II Sicherheitslanzette

Art.-Nr.: 103203



Für die sichere und fast schmerzfreie Blutentnahme.

- Nadel ist vor und nach der Anwendung komplett geschützt
- Vorgespannt, durch Druck auslösend
- Sorgt jederzeit für einwandfreie Blutproben
- Hochwertige, ultrascharfe und dreifachangeschrägte Nadel oder zweifachangeschrägte Klinge
- Hohe Einstichgeschwindigkeit
- Verschiedene Spitzenkonfigurationen und Einstichtiefen ermöglichen die gängigsten Kapillarblutabnahmen
- Für Blutzucker- und andere diagnostische In-vitro-Tests

Anleitung:

Schutzkappe vorsichtig abdrehen. Einstichstelle wählen und zum Auslösen der Lanzette das Gerät fest gegen diese pressen. Sicherheitslanzette in einem geeigneten Sicherheitsbehälter, wie z. B. die Servobox entsorgen.

Lagerfähigkeit: 5 Jahre.

Warnhinweis:

Sollte die Schutzkappe bereits bei Entnahme aus dem Karton fehlen, bitte die Lanzette nicht mehr benutzen!

Artikel	REF	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer: _____

Firma: _____

Vorname: Nachname: _____

E-Mail: _____

Straße, Hausnr.: _____

PLZ, Ort: _____

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs, unsere gültigen AGBs finden Sie unter <https://www.servoprax.de/agb/>